



✓ 刃溝がメタルに喰い込んで困ったこと、ありませんか？

製品名：ブッシュカーバイドバー
 分類：一般医療機器
 医療機器届出番号：13B1X00004000062
 一般名称：歯科用カーバイドバー


ドイツ製のブッシュなら、喰い込み知らずで切れ味抜群です。

ブッシュカーバイド クラウンカッターFG用

普通のプレーンカットのカーバイドバーでは、刃溝がメタルに喰い込んで止まってしまいます。ハンドピースはそのまま回転するため、ハンドピースの回転部、例えばチャックを損傷させてしまいます。


タングステンカーバイド製のブッシュFGクラウンカッターは、対角線が直交するように刃立てしてあるため喰い込みがありません。また、刃部が長いので、効率的に、軽いタッチで、スムーズにメタルを切断してクラウンやブリッジを撤去することができます。

推奨スピード180,000~200,000rpmの高速回転で使用できます。

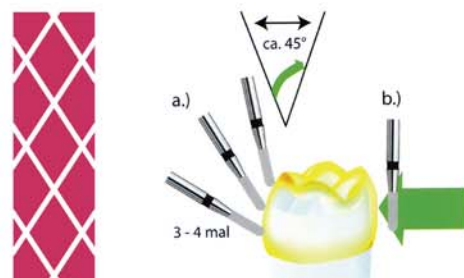


21RX

【包装】単品2本入
【価格】2,160円(税別)

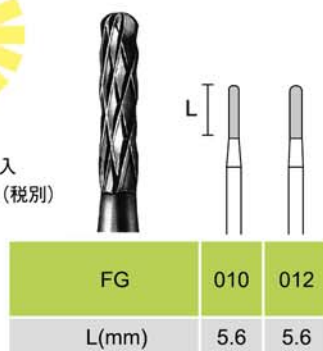


23RX

【包装】単品2本入
【価格】2,160円(税別)

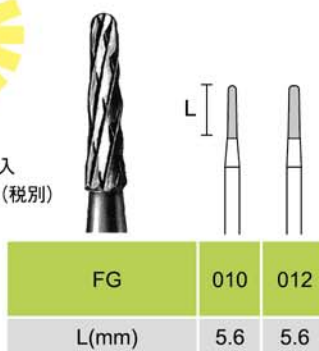

38RDL

【包装】単品2本入
【価格】2,300円(税別)

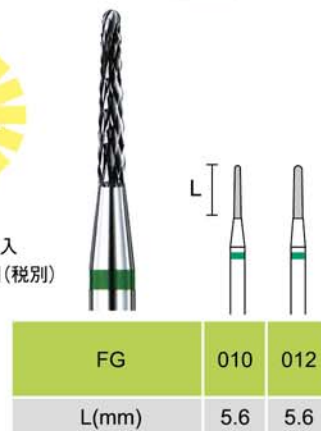

製品の詳細、弊社最新情報をインターネット上でご覧下さい。▶▶ www.tokyodental.co.jp

東京歯科産業

検索