

HyFlex™ EDM

期間：2026年 **2/24** (火) ~ **3/19** (木) 特別価格にてご提供いたします!

HyFlex EDM特徴



滅菌済み
再使用可能
保険適用



高い破折抵抗性

放電加工による回転疲労抵抗性の向上によってより安全な治療をご提供いたします



優れた切削力



可変クロスセクション

切削片の排出と破折抵抗性に優れています

キャンペーン

交換時期がわかりやすい

オートクレーブ滅菌により、本来の形状と強度を取り戻すことができます。

(*Sapienza University 2011) 形状回復する限り何度でも使用可能 (*薬事認証あり) となります。また「形状回復しない=ファイルの交換時期」となるので交換時期が一目で確認できます。

※使用后、金属疲労が目視で確認できない場合でも必ずオートクレーブ滅菌をしてください。

▼ 使用前



▼ 使用后



▼ オートクレーブ滅菌後(熱処理後)



形状回復の様子を二次元コードより動画で確認いただけます



高い柔軟性によりプレカーブを付与できます



HyFlexOGSFラインナップ

CORONAL				
MIDDLE				
APICAL				
	18/.11 Opener	15/.03 Glider	18/.045 Shaper	30/.04 Finisher
	Opener	Glidepath	Shaping	Finishing
回転数 (RPM)	400	300	400	
トルク (N/cm)	2.5	1.8	2.5	

HyFlexEDMラインナップ

CORONAL					
MIDDLE					
APICAL					
	25/.12 Orifice Opener	15/.03 Glidepath	10/.05 Shaping	20/.05 HyFlex™ Preparation File	25/.08-.04 HyFlex™ One File
	Access Opening (Optional)	Glidepath	Shaping	Finishing	
回転数 (RPM)	400	300	400		
トルク (N/cm)	2.5	1.8	2.5		

販売名: NiTiロータリファイルHyFlex 滅菌パッケージ 分類: 管理医療機器 医療機器認証番号: 228A0BZ00013Z00 一般的名称: 電動式歯科用ファイル 選任製造販売業者: AJMD 株式会社

ご注文は裏面のご注文用紙に必要事項をご記入の上FAXをお願いいたします。

必要事項をご記入の上、FAX注文で特別価格の適用となります。

HyFlexEDM

品番	商品名			個数
60019596	単品	Orifice Opener	25/12	15mm
60023493	21mm 単品	Glidepath File	15/03	21mm
60022269		Glidepath File	10/05	21mm
60022275		Preparation File	20/05	21mm
60022270		One File	25/08-.04	21mm
60022271		Finishing File	40/04	21mm
60022272		Finishing File	50/03	21mm
60022274		Finishing File	60/02	21mm
60022267		21mm	Shaping Set Shimple	25/12、10/05、25/08-.04
60022277	Shaping Set Medium		10/05、20/05、25/08-.04	21mm
60023494	アソート	Shaping Set Max Curve	15/03、10/05、20/05	21mm
60022268		Finishing Set	40/04、50/03、60/02	21mm
60023492	25mm 単品	Glidepath File	15/03	25mm
60019594		Glidepath File	10/05	25mm
60022276		Preparation File	20/05	25mm
60019595		One File	25/08-.04	25mm
60019597		Finishing File	40/04	25mm
60019598		Finishing File	50/03	25mm
60019599		Finishing File	60/02	25mm
60019363		25mm	Shaping Set Shimple	25/12、10/05、25/08-.04
60022278	Shaping Set Medium		10/05、20/05、25/08-.04	25mm
60023495	アソート	Shaping Set Max Curve	15/03、10/05、20/05	25mm
60019364		Finishing Set	40/04、50/03、60/02	25mm

HyFlex EDM OGSF

品番	商品名			個数
60036140	単品	Orifice Opener	18/11	18mm
60023493	21mm 単品	Glidepath File	15/03	21mm
60036136		Shaping File	18/045	21mm
60036138		Finishing File	30/04	21mm
60036141	21mmアソート	OGSF Sequence	18/11、15/03、18/045、30/04	21mm
60023492	25mm 単品	Glidepath File	15/03	25mm
60036137		Shaping File	18/045	25mm
60036139		Finishing File	30/04	25mm
60036142	25mmアソート	OGSF Sequence	18/11、15/03、18/045、30/04	25mm

(ふりがな) 医院名	(ふりがな) お名前
ご住所 〒 お電話 ()	お取引の歯科ディーラー名 ご担当者様名
メールアドレス	

上記枠内全てをご記入ください。記入漏れがある場合には、特別価格が適用されませんのでご注意ください。

ご記入いただいた個人情報につきましては、管理責任者を定めて、紛失や漏洩が発生しないように努めます。また、第三者に提供することはございません。

発売元

 東京歯科産業株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5 TEL:03-3831-0176 FAX:03-3835-8254

E-mail:info@tokyodental.co.jp https://www.tokyodental.co.jp

■大阪支店 ■九州支店

製造元

コルテン/ウェルデント

選任製造販売

AJMD 株式会社