



天然海藻

アルギン酸カルシウムを使用しています。

天然海藻(ジャイアントケルプ)から

抽出したアルギン酸カルシウムを線維化し、
プレスして固めた歯科医療用不織布です。

口腔外科をはじめ、心臓カテーテル治療や
脳血管内手術時の経皮的穿刺部止血など、
幅広く使用されています。

止血 TODENT ノパッド

20枚入りと5枚入りの2種類からお選びいただけます。

標準価格：【20枚入】16,400円(税別) 【5枚入】4,570円(税別)

【ご使用方法】

- 出血部位に直接触れることができる場合は、パッドを乾燥状態のままあてがい軽く圧迫を加えてください。
- 出血部位が直視できないような場合は、事前にパッドに生食を付与し(1cc程度以上)出血部近位にあてがい、軽く圧迫を加えてください。
- 止血後は必ずパッドを取り出し、廃棄してください。

【製品仕様】

- 原材料：アルギン酸カルシウム
(天然海藻由来)
- サイズ：10x25mm
- 入数：20枚/箱、5枚/箱
- 滅菌：ガンマ線

販売名：トーデント止血パッド
型番：T108001
分類：一般医療機器 滅菌済/再使用禁止
一般的名称：医療用不織布
届出番号：14B3X10038000008
製造販売元：アライアンス・メディカル・グループ株式会社
〒215-0011
神奈川県川崎市麻生区百合丘一丁目2番地1

販売元

 **東京歯科産業株式会社**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5
TEL:03-3831-0176 FAX:03-3835-8254
E-mail:main@tokyodental.co.jp
<http://www.tokyodental.co.jp>

■名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル13階
■大阪支店 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町8-12第3マイダビル203
■九州支店 〒812-0028 福岡県福岡市博多区須崎町4-23