

機械器具 70 歯科用鋳造器
一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼成炉 JMDN 35762000

ファイアーライト

【形状・構造及び原理等】

[形状]



寸法：横幅 34.3cm x 高さ 52.1cm x 奥行き 34.3cm

[電氣的定格]

電圧：AC100V, 50/60Hz
消費電力：1200W（ファーンレス単体、真空ポンプ使用時）
電撃に対する保護の形式：クラス I
電撃に対する保護の程度：B形

[使用最高温度]
1200℃

【使用目的又は効果】

歯科用ポーセレンの焼成

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

[設置]

水平な台に設置し、放熱のため、周囲に20cm以上の空間を確保する。

[使用方法]

1. 本体の真空バルブ、真空ポンプ及び真空ポンプのコンセントを、真空ポンプ用電源アウトレットに接続する。
2. 本体の電源を入れる。
3. コントロールパネルで焼成プログラムを選択する。
4. 焼成物を焼成皿に載せ、焼成台（テーブル）に置き、テーブル上昇ボタンを押して焼成炉に入れる。
5. コントロールパネルのスタートボタンを押し、焼成プログラムを開始する。
6. 焼成終了後、停止ボタンを押してプログラムを停止した後、テーブル下降ボタンを押して、焼成物を焼成炉から取り出す。
7. 焼成物を冷却トレイに置き、冷却する。

8. 操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前の状態に戻した後、電源を切る。または、プログラムをナイトモードに設定し、焼成炉を閉じる。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 単独電源で使用する。また、同一電源で他のファーンレス又は電気器具と一緒に使用しないこと。
2. 電源延長コードは使用しないこと。

【使用上の注意】

詳細は取扱説明書を参照すること。

1. 次の条件を満たす環境で使用する。
温度：15.5℃～26.6℃
相対湿度：45%～60%
2. 周囲に可燃物を置かないこと。
3. 本品を移動させる場合は、電源を切ってから1時間以上経過した後に行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等に対する安全状態に注意すること。
2. 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

[耐用期間]（保証期間ではない）
6年（焼成炉の保証期間は1年）

【保守・点検に係る事項】

詳細は取扱説明書を参照すること。

しばらく使用しなかった本品を再使用する際には、使用前に正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
製造業者	ウィップミックス社 (Whip Mix Corporation)
国名	アメリカ合衆国

取扱説明書等を必ずご参照ください。