

機械器具 60 歯科用エンジン  
一般医療機器 歯科技工用真空攪拌器 JMDN 70742000

## バキューム パワーミキサー VPM2

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔形状〕

本品は、電動攪拌装置及び真空ポンプを備えた真空攪拌機である。攪拌用ボウル（200mL用バキュームミキサー）、専用スタンド、バキュームフィルターが付属する。



寸法：横幅 18cm x 高さ 59.5cm x 奥行き 25cm

\*オプション品：300mL、500mL及び750mL用バキュームミキサー、壁掛けキット

#### 〔電気的定格〕

電圧：AC100 - 120V, 50/60Hz  
消費電流：5A  
電撃に対する保護の形式：クラス I  
電撃に対する保護の程度：B形

#### 〔原理〕

真空ポンプにより攪拌ボウル内を真空にし、パドルを回転させて内容物を攪拌、練和する。

### 【使用目的又は効果】

歯科用印象材、石こうの真空攪拌及び埋没材の真空攪拌と埋没

### 【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

#### 〔設置〕

1. 本品を垂直な壁に直接または合板を介して固定する。
2. ミキシングリングの下端と作業台との間隔を 23cm 以上にする。

#### 〔使用方法〕

1. バキュームミキサー（以下、ボウル）に水または専用液を計量して入れ、次に粉末を計量して加える。
2. 本体のスイッチを入れ、コントロールパネルを操作し、攪拌プログラムを選択する。

3. スタートキーを押し、真空ポンプを作動させる。
4. ボウルをブロックマシーンにセットし、ボウルがブロックマシーンに完全に保持されるまで手で支える。
5. 攪拌プログラムが終了すると、スピーカーより終了音が流れる。
6. ストップキーを押して真空ポンプを停止し、真空を解除し、ボウルを取り外す。
7. 定められた手順により操作スイッチなどを使用前の状態に戻した後、本体スイッチを切る。

#### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

スタート/ストップキーを押す際は、ボウルを落とさないように、手で支えること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

1. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等に対する安全状態に注意すること。
2. 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

#### 〔耐用期間〕（保証期間ではない）

6年

### 【保守・点検に係る事項】

詳細は取扱説明書を参照すること。

しばらく使用しなかった本品を再使用する際には、使用前に正常かつ安全に作動することを確認すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
製造業者	ウィップミックス社 (Whip Mix Corporation)
国名	アメリカ合衆国

取扱説明書等を必ずご参照ください。