

時代を超えて信頼のブランド

デンタータス スクリューポスト

世界の臨床医に高く評価されてるデンタータス スクリューポストは
支台築造および歯冠修復の際の保持力を正確に補強します。



スターリフィルキット



TST



RST


ショート ロング



リーマ

TITANIUM

ステップ

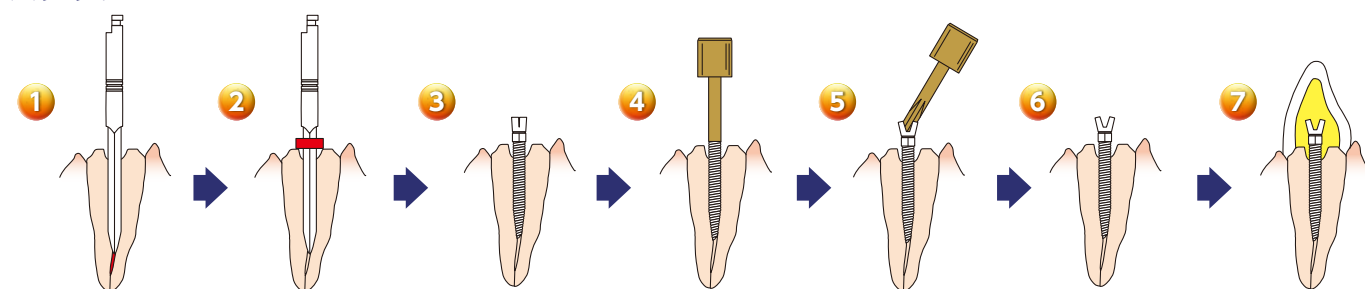

最終拡大ファイルの番手に応じたリーマから開始し、ポスト径に合わせて段階的に拡大する

使用するポストの径・長さに応じた最終形成を行う

試適を行う

パット上でスクリー部にセメントを絡ませた後、ホローキーを用い、根管内に軽いポンピングを行い埋入する

歯軸を合わせた後クロスキーを用いてヘッド部クロス溝をひろげる

完成


デンタータス スクリューポスト専用リーマを使用していますか？

スクリーポストは、機械的維持を高めるためのデザインになっています。(木ネジではありません。) 専用リーマで適切な径を拡大しないと根破折の原因となります。2種類の専用ドライバー(埋入用、頭部開放用)もデンタータスの特徴です。

医院の必需品をこの機会にお揃えください。詳しくはお取引の販売業者にお尋ねください。

■ スクリューポスト 独自の螺旋状の溝と解剖学的形態

スウェーデン、デンタータス社が1932年に開発したスクリューポストは現在でも支台構造の保持力補強の方法として世界の臨床医に広く使用されています。オリジナルのゴールドプレートポストに加え生体親和性に優れた純チタン製ポストもラインナップに揃えています。形状やサイズ、表面構造は変わりませんので同じテクニックでお使いいただけます。

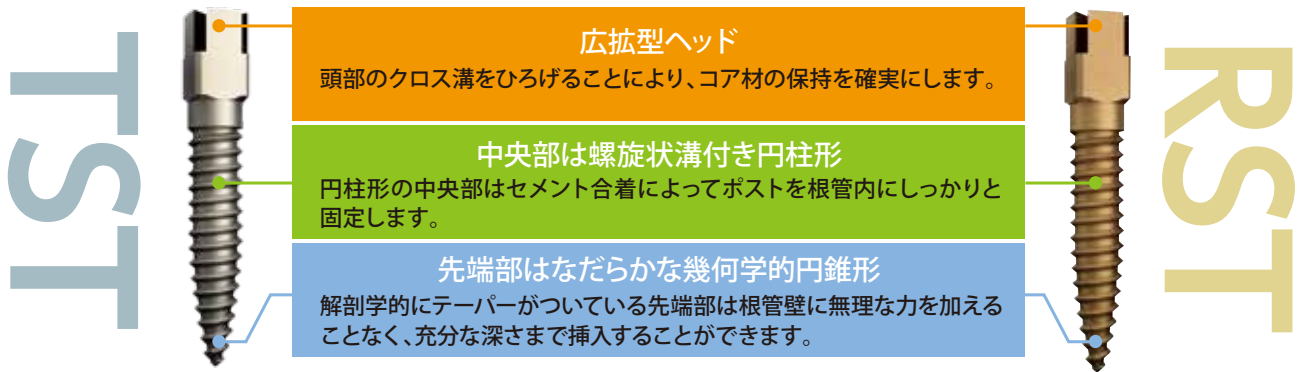

キット

付属のチェアサイドディスペンサーは、スクリューポストやリーマのサイズ(直径)を測定するポストゲージと、リーマの長さを測定するメジャーが付いた実用的なキットです。診療を効率的に進めることが可能です。

● TST スターターリフィルキット

- 【コード】712-321
 【包装】・チタニウムスクリューポスト TST 120本 (6×20サイズ)
 ・ホローキー及びクロスキー 各1個
 ・リーマ ストッパー 20個

● RST スターターリフィルキット

- 【コード】712-308
 【包装】・スクリューポスト RST 120本 (6×20サイズ)
 ・ホローキー及びクロスキー 各1個
 ・リーマ ストッパー 20個

サイズ(直径)を測定するポストゲージ



単品

スクリューポストをサイズ別にお買い求めいただけます。

● TST リフィルパッケージ

- 【コード】712-317
 【包装】同一形体 15本入

● RST リフィルパッケージ

- 【コード】712-310
 【包装】同一形体 15本入



透明な蓋は回転式です。

■ リーマ

ポストとリーマの径を一対にすることで歯根とポストの一体化、治療時間の節約を実現します。

デンタータス リーマアソート

- 【コードと包装】・712-350 ショート(RUA) 28.5mm S1/S2/S3/S4/S5/S6 各サイズ1本入
 ・712-351 ロング(RUB) 33.5mm L1/L2/L3/L4/L5/L6 各サイズ1本入



スクリューポストの径に合わせてお買い求め下さい。

サイズ表(ポストとリーマのサイズが一対です)

	長さ	径	径					
			1	2	3	4	5	6
ポスト	S	7.8mm	S1	S2	S3	S4	S5	S6
	M	9.3mm	M1	M2	M3	M4	M5	M6
	L	11.8mm	L1	L2	L3	L4	L5	L6
	EL	14.2mm			EL3	EL4	EL5	EL6
	SL	17.0mm			SL3	SL4	SL5	SL6
リーマ	ショート	28.5mm	S1	S2	S3	S4	S5	S6
	ロング	33.5mm	L1	L2	L3	L4	L5	L6

スクリューポスト、リーマは単品でも販売しています。(サイズはチャートを参照ください)

製品名:デンタータス スクリューポスト
 製品名:デンタータス チタニウム スクリューポスト
 製品名:デンタータス リーマ

分類:管理医療機器 医療機器認証番号:14000BZY00156000
 分類:管理医療機器 医療機器認証番号:15200BZY00933000
 分類:管理医療機器 医療機器認証番号:224AIBZX00048000

一般的名称:歯科根管用ポスト成形品
 一般的名称:歯科根管用ポスト成形品
 一般的名称:歯科用電動式ドリル

製造販売元

東京歯科産業株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5
 TEL:03-3831-0176 FAX:03-3835-8254
 E-mail:main@tokyodental.co.jp
 http://www.tokyodental.co.jp

■名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル13階
 ■大阪支店 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町8-12第3マイダビル203
 ■九州支店 〒812-0028 福岡県福岡市博多区須崎町4-23
 TEL:092-281-5625