



Twin Luscent Anchors

ツインルーセントアンカー



Standard
スタンダード・タイプ

Twin
ツイン・タイプ

強さ

支台歯の復元を強化

光の透過性

審美的な修復

適応

一般的なファイバーポスト用レジンに対応可能

除去

デンタータスリーマを使用して容易に取り外しが可能


グラス
ファイバー製

Made of Glass Fiber



製品名:デンタータス ツインルーセントアンカー 分類:管理医療機器 医療機器認証番号:224AIBZX00039000 一般的名称:歯科根管用ポスト成形品 製造元:デンタータス(スウェーデン)
製品名:デンタータスリーマ 分類:管理医療機器 医療機器認証番号:224AIBZX00048000 一般的名称:歯科用電動式ドリル 製造元:デンタータス(スウェーデン)
製品名:コアフォームフィット 分類:一般医療機器 医療機器届出番号:13B1X00004000216 一般的名称:歯科用充填・修復材補助器具 製造元:デンタータス(スウェーデン)

歯茎・歯牙に影響を及ぼさない光透過性

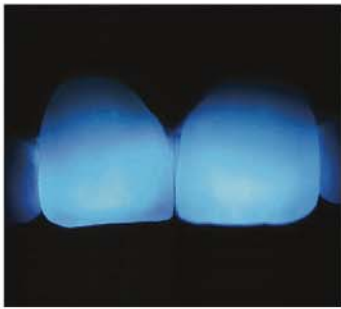


注※レジン築盛前にマーカーリングを除去してください。

ツインルーセントアンカーは優れた光透過性により、金属製ポストに見られる金属色の透過もなく、天然歯に近い自然な色調の審美的補綴が可能です。

優れた弾性により、歯根への負担を軽減します。

▶ グラスファイバーで補強された複合ポストによる潜在的破折部位

▶ 金属ポストによる潜在的破折部位

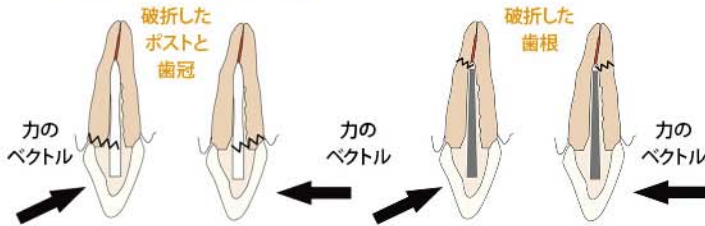

ツインルーセントアンカーは、従来の金属製ポストと比べて弾性係数が象牙質と近似しています。歯のたわみに応じて屈曲しながら応力を分散するため、歯根への負担を軽減し、突然の大きなストレスにも歯冠と歯根が損傷を受ける前に破折します。

弾性の比較

象牙質

20.1 Gpa

Source: Al-Harbi FA, Nathanson D. Mechanical and retentive properties of new aesthetic posts. J Dent Res 80 (AADR Abstracts) 2001, (Boston University, Boston Mass).

ツインルーセントアンカー 20.41Gpa

ツイン・タイプ

特徴 利点

窪みのある中央部

● 保持力
・突発的な応力に対する機械的な保持力

縦に伸びたベントグループ

● 排出
・余剰なレジンを排出しやすくなります。

● 回転抵抗
・使用するレジンとの回転抵抗を創り出します。

円錐形体の末端 / 円柱形体の末端

● 選択
・円錐形体の末端側は根壁や象牙質を過剰に切削することなく狭い根壁へも深く入れることが可能です。
・円柱形体の末端側は広くなった根壁への使用が可能です。

スタンダード・タイプ

テーパの付与



ツイン同様狭い根壁にも最適なポスト

ポストとリーマのサイズが一对です。

ツインルーセントアンカーはポストとリーマのサイズを一对にすることで歯根とポストの一体化、治療時間の節約を実現します。

Standard スタンダード・タイプ

Twin ツイン・タイプ

XXXS

XXS

XS

S

M

L

XS

S

M

L



径1

径1.15

径1.3

径1.45

径1.6

径1.75

リーマ径1.1

リーマ径1.29

リーマ径1.4

リーマ径1.5

リーマ径1.7

リーマ径1.9

径1.26

径1.4

径1.54

径1.68

リーマ径1.35

リーマ径1.5

リーマ径1.65

リーマ径1.8

(mm)

(mm)

【包装】

● スタンダード・タイプ

・アソート (LUC-K10/J) LUC-XS/S/M (各5本入)
・単品5本入 LUC-XXXS/XXS/XS/S/M/L
・単品15本入 LUC-XXXS/XXS/XS/S/M/L

コアフォームフィット小・中・大 (各5個入)
コアフォームフィット小・中・大 (各2個入)
コアフォームフィット小・中・大 (各5個入)

【価格】12,000円(税別)
【価格】4,580円(税別)
【価格】13,700円(税別)

● スタンダード・タイプ用 リーマ

・アソート RSG-S3/S4/S5 (各1本入)
・単品2本入 RUG-S1/S2
・単品3本入 RSG-S3/S4/S5/S6
RSH-L3/L4/L5/L6

【価格】6,600円(税別)
【価格】4,200円(税別)
【価格】6,600円(税別)

● ツイン・タイプ

・アソート (LUT-K4/J) LUT-XS/S/M (各5本入)
・単品5本入 LUT-XS/S/M/L
・単品15本入 LUT-XS/S/M/L

コアフォームフィット小・中・大 (各5個入)
コアフォームフィット小・中・大 (各2個入)
コアフォームフィット小・中・大 (各5個入)

【価格】13,800円(税別)
【価格】4,800円(税別)
【価格】14,200円(税別)

● ツインタイプ用 リーマ ※スクルーポストのリーマと共通です。
・単品3本入 RUA-S3/S4/S5/S6
RUB-L3/L4/L5/L6
【価格】5,510円(税別)

コアフォームフィット

口腔内で支台築造用レジンを通し硬化させるために用いる補助器具。直接法を効率よく行うことができます。



【包装】アソート：小・大(各33個)、中(34個) 計100個入 【価格】4,800円(税別)
単品：小、中、大 各100個入