

メクトロン プロフィーパウダーは数多くの症例に適用します

パウダー



メクトロン プロフィーパウダー
ソフトプラス 250g x 4本入り
主成分：炭酸水素ナトリウム
平均粒径：40μ



メクトロン プロフィーパウダー
センシティブプラス 160g x 2本入り
主成分：グリシン
平均粒径：15μ

販売名：メクトロンプロフィーパウダー
製造販売届出番号：13B1X00004000224

歯面の強固なステイン 	緑上バイオフィルム 	緑下バイオフィルム 	5mm以上の歯肉ポケットの清掃 	インプラントメンテナンス
インプラント周囲炎 	ホワイトニングの前に 	矯正装置 	シーラント前の裂溝 	補綴物の縁下
補綴物のメンテナンス 	仮封材、仮着材の除去 	補充品 ペリオチップ (滅菌済) 40個入 	ユニバーサルカート オプションのユニバーサルカートがあれば ストレスなくコンビタッチを移動できます。 【仕様】サイズ：W5700×L5800×H9600mm、重量：28kg 	

- 包装内容**
- ・ハンドピース (LED付)
 - ・インサートチップ S1S
 - ・インサートチップ P3
 - ・ボトル 500mL
 - ・キャップ グレー
 - ・トルクレンチ K10
 - ・ペリオチップ (滅菌済) 40個入

- ・エアポリッシングハンドピース 120°
- ・エアポリッシングハンドピース ペリオ
- ・レンチ K9
- ・メクトロン プロフィーパウダー ソフトプラス 250g
- ・メクトロン プロフィーパウダー センシティブプラス 160g
- ・フットスイッチ

仕様

電源：100-240V 50/60Hz
 重量：4.8kg
 サイズ：W410×L260×H145mm (本体)
 周波数：24KHz～36KHz

【特定保守管理医療機器】
 販売名：コンビタッチ
 分類：管理医療機器
 認証番号：230AGBZX00122000
 一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
 コード：70719000
 製造元：Mectron S.p.A. (イタリア)
 ※カタログ掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

製造元



製造販売元



東京本社：〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5
 TEL: 03-3831-0176 (代) / FAX: 03-3835-8254
 大阪支店：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町8-12第3マイダビル203
 九州支店：〒812-0028 福岡県福岡市博多区須崎町4-23
 TEL: 092-281-5625 / FAX: 092-291-7553

2022.8 (3)

New Slim

超音波多目的治療器

COMBI touch

コンビタッチ



超音波多目的治療器

ALL IN ONE

New Slim

COMBI touch

コンビタッチ

メンテナンスはこれだけでOK

超音波スケーラーとエアポリッシャーを兼ね備えた多目的治療器コンビタッチは、歯肉縁上縁下の歯石、ステイン、バイオフィルムの除去、インプラントのクリーニングに使用できるだけでなく、形成、エンドなど幅広い領域でご使用いただけます。

超音波で。


スリムLEDハンドピース

超音波スケーラーハンドピースは、最大直径が18mmで、リング式LEDライトで術野を明るく照らし出します。

注水システム


超音波スケーラー用の注水は、水道水か、目的に合わせた薬液を使用できるボトル(500ml)の2系統から選択できます。

ソフトモード

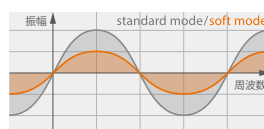

過敏な患者さんや、炎症を起こしやすい患者さんへの歯周治療に使用します。振幅を小さくすることで、出力を下げることなく刺激の少ない治療が行えます。

パルスモード

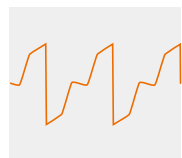

「restorative」モードでパワーを最大(5)にするとパルスモードが作動します。形成用チップの性能を最大限発揮できるよう超音波の波形を自動で変換します。

チップ

50種類以上の超音波用チップがあり、スケーリングやペリオ、エンド、形成など様々な用途に対応しています。



3種類のエアポリッシングハンドピース

歯肉縁上および5mmまでの歯周ポケットにアクセスする90°と120°のエアポリッシングハンドピース。5mm以上の歯周ポケットにアクセスするよう開発されたペリオ用の3種類がラインナップ。



縁下用ペリオチップ



ペリオ用エアポリッシングハンドピースに装着するペリオチップは、薄く、柔軟性が高いため、歯周ポケットへのアクセスが容易です。

2種類のパウダーチャンバー

歯肉縁上用パウダーチャンバー「prophy」と歯肉縁下用パウダーチャンバー「perio」をワンクリックで切り替えが可能です。

つまりを防止

ユニットのメインスイッチを入れると自動的に微弱エアでチューブ内を常に乾燥状態に保ち、つまりを防止します。

パウダーで。

患者さんにやさしい

給水は内蔵ヒーターにより、常に安定した温かい水が供給されます。

パウダーリフィル機能

電源オフにすることなくパウダーの補充が行えます。

ワンタッチで内部洗浄

「flush」を押して、フットスイッチを1秒踏むと、超音波スケーラー、エアポリッシャーの内部を洗浄することができます。

タッチパネルで簡単操作

パワーや流水量、機能がアイコン表示のわかりやすいタッチパネルで簡単に調整できます。(グローブ装着時でも操作可能)