

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用咬合堤ワックス JMDN 38602000

アルーワックス

【禁忌・禁止】

本品に対して過敏症の既往歴のある歯科従事者及び患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光を避けて室温下で保管すること。

【形状・構造及び原理等】

[形状]

	種類	形状	用途
①	デンチャー	長方形、薄型	広い範囲の咬合採得用
②	クロスフォーム	馬蹄形、綿布入り	フルマウスの咬合採得用
③	スコアード	リボン状厚型	局部の咬合採得用

[原材料]

ミツロウ、パラフィン、酸化アルミニウム、コンスターチ

[原理]

加熱し、軟化して使用する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 東京歯科産業株式会社
電話番号 03-3831-0176(代)
製造業者 アルーワックス社
(Aluwax Dental Products Co.)
国名 アメリカ合衆国

【使用目的又は効果】

咬頭嵌合位や中心位の咬合採得に用いる。

【使用方法等】

- 湯または火炎上で多少軟化させる。
- 口腔内歯列部に軽く圧接し、咬合させる。
- エアークリーンやウォーターシリンジで冷却する。
- 口腔内から取り出す。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 軟化させすぎないこと。
- 口腔内に挿入する時は、加熱された本品で患者の口腔内組織を加熱しないこと。

【使用上の注意】

- 使用注意
本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- 重要な基本的注意
本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。