

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用咬合堤ワックス JMDN 38602000

アルモア バイト・レジストレーション ワックスタブ


【禁忌・禁止】

本品に対して過敏症の既往歴のある歯科従事者及び患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状】

ブルー色のタブ状ワックス

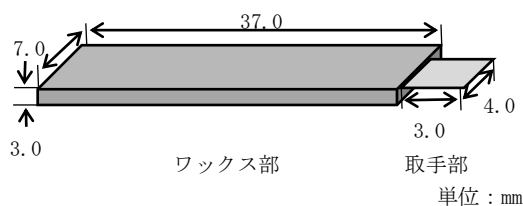

【成分】

ワックス部：パラフィン、石油ろう、エチレン酢酸ビニル共
重合体、炭化水素樹脂

取手部：アルミニウム

【使用目的又は効果】

咬合の採得

【使用方法等】

1. 本品を約 58℃の温水に1分間浸漬し、適度に軟化させる。
2. 補綴側の歯列弓咬合面に圧接し、咬合させる。
3. エアーマタまたはウォータースリッジで冷却した後、口腔外に取り出す。

【使用上の注意】

【使用注意】

1. 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
2. 軟化した本品を口腔内に挿入する際、粘膜に付着させないこと。

【重要な基本的注意】

本品に対して過敏症の既往歴のある歯科従事者及び患者には使用しないこと。過敏症が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光を避けて室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 東京歯科産業株式会社
電話番号 03-3831-0176(代)
*製造業者 ヘーガーワールドワイド社
(Hager Worldwide, Inc.)
国名 アメリカ合衆国