

# メクトロン プロフィーパウダーは数多くの症例に適應します

## パウダー

販売名：メクトロンプロフィーパウダー  
製造販売届出番号：13B1X00004000224

### メクトロン プロフィーパウダー 250g x 4本入り

主成分：炭酸水素ナトリウム  
平均粒径：55μ

ミント



レモン



### メクトロン プロフィーパウダー センシティブプラス 160g x 2本入り

主成分：グリシン  
平均粒径：15μ



#### 歯面の強固なステイン




#### 縁上バイオフィルム



#### 縁下バイオフィルム




#### 5mm以上の歯肉ポケットの清掃

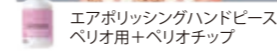

#### インプラントメンテナンス



#### インプラント周囲炎

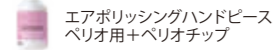

#### ホワイトニングの前に



#### 矯正装置



#### シーラント前の裂溝



#### 補綴物の縁下



#### 補綴物のメンテナンス



#### 仮封材、仮着材の除去



#### 補充品

ペリオチップ (滅菌済) 40個入



#### ユニバーサルカート

オプションのユニバーサルカートがあれば  
ストレスなくコンビタッチを移動できます。

【仕様】サイズ：W5700×L5800×H9600mm、重量：28kg



#### 包装内容

- ・ハンドピース (LED付)
- ・インサートチップ S1S
- ・インサートチップ P3
- ・ボトル 500mL
- ・キャップ グレー
- ・トルクレンチ K10
- ・ペリオチップ (滅菌済) 40個入
- ・エアポリッシングハンドピース 120°
- ・エアポリッシングハンドピース ペリオ
- ・レンチ K9
- ・メクトロン プロフィーパウダー センシティブプラス 160g x 2本
- ・フットスイッチ

#### 仕様

電源：100-240V 50/60Hz  
重量：4.8kg  
サイズ：W410×L260×H145mm (本体)  
周波数：24KHz~36KHz

【特定保守管理医療機器】  
販売名：コンビタッチ  
分類：管理医療機器  
認証番号：230AGBZX00122000  
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器  
コード：70719000  
製造元：Mectron S.p.A. (イタリア)  
※カタログ掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

製造元

製造販売元

# New Slim

歯科用多目的超音波治療器

# COMBI touch

## コンビタッチ



歯科用多目的超音波治療器

ALL IN ONE

New Slim

# COMBI touch

コンビタッチ

## メンテナンスはこれだけでOK

超音波スケーラーとエアポリッシャーを兼ね備えた多目的治療器コンビタッチは、歯肉縁上・縁下の歯石、ステイン、バイオフィルムの除去、インプラントのクリーニングに使用できるだけでなく、形成、エンドなど幅広い領域でご使用いただけます。

## 超音波で。


### スリムLEDハンドピース

超音波スケーラーハンドピースは、最大直径が18mmで、リング式LEDライトで術野を明るく照らし出します。

### 注水システム

超音波スケーラー用の注水は、水道水か、目的に合わせた薬液を使用できるボトル(500ml)の2系統から選択できます。

### ソフトモード

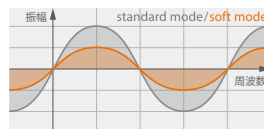

過敏な患者さんや、炎症を起こしやすい患者さんへの歯周治療に使用します。振幅を小さくすることで、出力を下げることなく刺激の少ない治療が行えます。

### パルスモード

「restorative」モードでパワーを最大(5)にするとパルスモードが作動します。形成用チップの性能を最大限発揮できるよう超音波の波形を自動で変換します。

## チップ

50種類以上の超音波用チップがあり、スケーリングやペリオ、エンド、形成など様々な用途に対応しています。



## 3種類のエアポリッシングハンドピース

歯肉縁上および5mmまでの歯周ポケットにアクセスする90°と120°のエアポリッシングハンドピース。5mm以上の歯周ポケットにアクセスするよう開発されたペリオ用の3種類がラインナップ。



### 縁下用ペリオチップ



ペリオ用エアポリッシングハンドピースに装着するペリオチップは、薄く、柔軟性が高いため、歯周ポケットへのアクセスが容易です。

## 2種類のパウダーチャンバー

歯肉縁上用パウダーチャンバー「prophy」と歯肉縁下用パウダーチャンバー「perio」をワンクリックで切り替えが可能です。

## つまりを防止

ユニットのメインスイッチを入れると自動的に微弱エアでチューブ内を常に乾燥状態に保ち、つまりを防止します。

## パウダーで。

## 患者さんにやさしい

給水は内蔵ヒーターにより、常に安定した温かい水が供給されます。

## パウダーリフィル機能

電源オフにすることなくパウダーの補充が行えます。

## ワンタッチで内部洗浄

「flush」を押して、フットスイッチを1秒踏むと、超音波スケーラー、エアポリッシャーの内部を洗浄することができます。

## タッチパネルで簡単操作

パワーや流水量、機能がアイコン表示のわかりやすいタッチパネルで簡単に調整できます。(グローブ装着時でも操作可能)