

医療用品 04 整形用品
管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品 JMDN 38609000
デンタータス チタニウム スクリューポスト

再使用禁止































【禁忌・禁止】

1. 本品に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

****[形状]**

本品はねじ部（ねじが切つてある箇所）と頭部から成り、頭部には十字の溝（スリワリ）があり、下記の 26 タイプがある。表面全体につや消し処理（サンドブラस्टィング）が施されている。

| タイプ | 直径 mm | | 長さ mm | | | | | |
|-----------------------|-------|--|---|---|---|---|---|---|
| | 長さ mm | | 1.05 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 1.65 | 1.80 |
| TST-S (ショート) | 7.8 | |  |  |  |  |  |  |
| TST-M (メディアム) | 9.3 | |  |  |  |  |  |  |
| TST-L (ロング) | 11.8 | |  |  |  |  |  |  |
| TST-EL (エクストラ ロング) | 14.2 | |  |  |  |  |  |  |
| TST-SL (スーパー ロング) | 17.0 | |  |  |  |  |  |  |
| | 番号 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

【付属品】

装着工具：本品を根管に挿入する際に使用する。



ホローキー NLH タイプ



クロスキー NLK タイプ

【材質】

| 成分 | 含有率 |
|-----|---------|
| チタン | 99.990% |
| 鉄 | 0.005% |
| 炭素 | 0.005% |

【使用目的又は効果】

歯科修復物、補綴物等の維持又は補強

【使用方法等】

【使用方法】

1. 本品を軽く流水で洗浄した後、超音波洗浄機で 5-10 分間洗浄する。
2. 高圧蒸気（オートクレーブ）で 135℃、8 分間滅菌する。
3. 通法により破損歯牙の抜髄処理を行い、破損部分を成形する。
4. 本品を根管内に挿入しやすくするため、リーマまたはファイルを用いて根管を拡大する。

- *5. パット上で本品のスクリュー部にセメントを絡ませた後、歯科用ピンセットで根管内へ運び入れ、回転させながら挿入する。
- *6. クロスキーを用いて頭部のクロス溝を押し広げることによりアンダーカット部とし、コア材の保持を確実にする。
- *7. 修復材を用いて、歯冠部を修復する。これにより、修復部分は本品により保持される。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 本品を使用する前に、高圧蒸気（オートクレーブ）で 135℃、8 分間滅菌すること。
2. 本品を挿入する時、強い力でねじ込まないこと。
- *3. 装着工具（ホローキー、クロスキー）は本品を根管内へ運ぶためのものではない。

【使用上の注意】

【使用注意】

1. 本品を用いる場合の根管形成には、同社製のリーマを使用すること。
2. 口腔内への落下防止のため、治療中はラバーダムを使用すること。
- *3. 本品を口腔外から運び入れる際は、必ず歯科用ピンセットで本品を把持して根管内へ運び入れること。

【重要な基本的注意】

本品の使用により過敏症が現われた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

【不具合・有害事象】

掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがある。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 東京歯科産業株式会社
電話番号 03-3831-0176(代)
製造業者 Dentatus AB（デンタータス）
国名 スウェーデン