

医療用品 04 整形用品
管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品 JMDN 38609000

デンタータス スクリューポスト

再使用禁止


















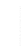



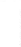



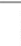
【禁忌・禁止】

1. 本品に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状]

本品はねじ部（ねじが切つてある個所）と頭部から成り、頭部には十字の溝（スリワリ）があり、下記の26タイプがある。表面全体につや消し処理（サンドブラस्टィング）が施され、さらに、口腔内で変質、変色しないように、0.5ミクロンの金メッキが施されている。

タイプ	直径 mm						
	長さ mm	1.05	1.20	1.35	1.50	1.65	1.80
RST-S (ショート)	7.8						
RST-M (メディアム)	9.3						
RST-L (ロング)	11.8						
RST-EL (エクストラ ロング)	14.2						
RST-SL (スーパー ロング)	17.0						
	番 号	1	2	3	4	5	6

[付属品]

装着工具：本品を根管に挿入する際に使用する。



ホローキー NLH タイプ



クロスキー NLK タイプ

[材質]

成分	含有率
銅	63%
亜鉛	37%

*0.5 μmの厚みの金メッキが表面全体に施されている。

【使用目的又は効果】

歯科修復物、補綴物等の維持又は補強

【使用方法等】

[使用方法]

1. 本品を軽く流水で洗浄した後、超音波洗浄機で5-10分間洗浄する。
2. 高圧蒸気（オートクレーブ）で135℃、8分間滅菌する。
3. 通法により破損歯牙の抜髄処理を行い、破損部分を成形する。
4. 本品を根管に挿入しやすくするため、リーマまたはファイルを用いて根管を拡大する。

- **5. パット上で本品のスクリュー部にセメントを絡ませた後、歯科用ピンセットで根管内に運び入れ、回転させながら挿入する。
- **6. クロスキーを用いて頭部のクロス溝を押し広げることによりアンダーカット部とし、コア材の保持を確実にする。
7. 修復材を用いて、歯冠部を修復する。これにより、修復部分は本品により保持される。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 本品を使用する前に、高圧蒸気（オートクレーブ）で135℃、8分間滅菌すること。
2. 本品を挿入する時、強い力でねじ込まないこと。
- **3. 装着工具（ホローキー、クロスキー）は本品を根管内へ運ぶためのものではない。

【使用上の注意】

[使用注意]

1. 本品を用いる場合の根管形成には、同社製のリーマを使用すること。
2. 口腔内への落下防止のため、治療中はラバーダムを使用すること。
- **3. 本品を口腔外から運び入れる際は、必ず歯科用ピンセットで本品を把持して根管内へ運び入れること。

[重要な基本的注意]

本品の使用により過敏症が現われた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

[不具合・有害事象]

掌蹼膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがある。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 東京歯科産業株式会社
電話番号 03-3831-0176(代)
製造業者 Dentatus AB (デンタータス)
国名 スウェーデン