

機械器具 67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム防湿キット JMDN 11155020

トーデント コーキングダム

【禁忌・禁止】

1. 本品に含まれる成分に対して過敏症の既往歴のある歯科従事者および患者には使用しないこと。
2. 付属のチップは再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状】



性 状：不透明な青色ジェル
容 器：シリンジ
付属品：コーキングダムチップ

【原材料】

レジンジェル：ウレタンジメタクリレート、ビスフェノール A エトキシレートジメタクリレート、シリカ、トリエチレングリコールジメタクリレート、他
容器（シリンジ）：ポリプロピレン

【原理】

レジンジェルをラバーダムと歯との間に塗布し、光重合によりレジンジェルを硬化させて封鎖し、処置部への唾液及び薬液の侵入を防ぐ。

【使用目的又は効果】

ラバーダムと歯との間隙を封鎖することによる処置部の汚染防止及び防湿

【使用方法等】

【使用方法】

1. シリンジのキャップを外し、シリンジの先端にトーデントコーキングダムチップ（医療機器認証番号 13B1X00004000226）を回しながらしっかりと取り付ける。
2. 手のひらでプランジャーを押すように把持し、シリンジからレジンジェルを押し出し、ラバーダムと歯との間隙に 1～1.5 mm の厚さで塗布する。
3. 光重合照射器で 10 秒間照射して、レジンジェルを硬化させる。
4. 治療後は、スパチュラまたはピンセットで硬化したレジンジェルを除去する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 本品を患者の口腔内で使用する前に、必ずチップからのレジンジェルの流出状態を確認すること。スムーズに流出しない場合は、チップを交換すること。
2. シリンジからレジンジェルを押し出す際は、ゆっくりと一定の圧力で行うこと。

3. レジンジェルの硬化を防ぐため、使用後は速やかにシリンジにキャップをすること。

【使用上の注意】

【使用注意】

1. シリンジ内のレジンジェル容量は複数回分ある。交叉感染を防ぐため、使用毎にシリンジを消毒し、チップを交換すること。
2. レジンジェルを硬化させた後は、ラバーダムに必要以上の力をかけたり、無理に伸ばしたりしないこと。封鎖した部分が破れることがある。
3. レジンジェルが口腔内に付着した場合は、濡れた歯ブラシ、歯間ブラシ、フロス等により除去し、完全に水洗いすること。付着が歯肉縁下まで及んだ場合も同様にキュレット等で除去した後、完全に水洗いすること。
4. レジンジェルが目に入らないように、取扱に十分注意すること。万一、目に入った場合は、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医に相談すること。
5. レジンジェルが皮膚に付着した場合は、直ちに石鹸等でよく洗うこと。

【重要な基本的注意】

本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

キャップをしっかりと閉め、直射日光を避けて 25℃以下で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
製造業者	S&C ポリマー社 (S&C Polymer GmbH)
国名	ドイツ