

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用注入器具 JMDN 70718000
トーデント コーキングダムチップ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状]

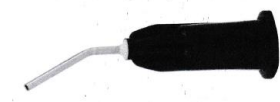

ニードルのサイズ：1.2×13mm
ニードルの太さ：18G
ニードルの曲げ角度：30° ±5°

[原材料]

ポリプロピレン、ステンレス鋼

[原理]

本品をトーデント コーキングダム（医療機器届出番号13B1X00004000225）に取り付け、プランジャーを押すことによりレジンジエルが流出する。

【使用目的又は効果】

ラバーダムと歯との間にレジンジエルを塗布する。

【使用方法等】

[使用方法]

1. トーデント コーキングダム（医療機器届出番号13B1X00004000225）のシリンジのキャップを外し、シリンジの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
2. 手のひらでプランジャーを押すように把持し、本品の先端からレジンジエルを押し出し、必要箇所に1～1.5 mmの厚さで塗布する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. トーデント コーキングダム（医療機器届出番号13B1X00004000225）以外には使用しないこと。
2. 本品を患者の口腔内で使用する前に、必ずチップからのレジンジエルの流出状態を確認すること。スムーズに流出しない場合は、チップを交換すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

患者ごとに交換し、再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

室温保存

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 東京歯科産業株式会社
電話番号 03-3831-0176(代)
製造業者 S&C ポリマー社 (S&C Polymer GmbH)
国名 ドイツ