

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 JMDN 70904000

メクトロン プロフィーパウダー

【禁忌・禁止】

1. 本品に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の既往歴のある歯科従事者及び患者には使用しないこと。
2. 呼吸器疾患の患者には使用しないこと。
3. レモン味は塩分摂取制限中の患者には使用しないこと。
4. 口腔内に傷や出血、炎症等の異常が認められる患者には使用しないこと。
5. 軟組織や歯肉溝に向けて噴射しないこと。気腫を発生させた事例が報告されている。

【形状・構造及び原理等】

[形状]

粉末

*[成分]

種類	成分
レモン	炭酸水素ナトリウム、香料、その他
スムーズ	炭酸カルシウム、その他
ソフトプラス	炭酸水素ナトリウム、香料、その他
センシティブプラス	グリシン、その他

【使用目的又は効果】

電動式歯面清掃用装置等と使用することにより、歯面の清掃に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前にボトルを軽く2～3回振る。
2. 本品を電動式歯面清掃用装置等に補充し、歯面の清掃に使用する。
3. 使用後は速やかにうがい等で口腔内を水洗する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 電動式歯面清掃用装置等は、装置メーカーの指示に従って使用すること。
- *2. 本品は吸湿しやすいため固まるおそれがあり、湿気にさらさないこと。電動式歯面清掃用装置等のチャンバー内に残留した本品は、その日の使用が終了した段階で廃棄すること。
3. 使用後はボトルの蓋をしっかりと閉めること。
4. 均一にするために、使用前にボトルを必ず振ること。

【使用上の注意】

[使用注意]

1. 本品を使用して清掃する際には、目の損傷を防ぐために患者及び歯科従事者は保護眼鏡等を使用すること。
2. 本品を使用する歯科従事者は、グローブとマスクを使用すること。
3. 本品を使用する場合はバキュームを行うこと。

[重要な基本的注意]

1. 本品に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の既往歴のある歯科従事者及び患者には使用しないこと。

2. 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
3. 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた歯科従事者は使用を中止し、医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 直射日光、高温を避けて保管すること
2. 歯科従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 東京歯科産業株式会社
電話番号 (03)3831-0176
製造業者 Mectron S.p.A.
国名 イタリア