

MP チップの取扱いについて

- 本品は医療機器であり、規定の目的に従い使用してください。
- 使用時の推奨パワーはエンドモード 1 もしくは 2 です。
※必要以上に出力を上げることや、チップに過度な力が加わる行為は破損の原因になるためご注意ください。
- 繰り返しの使用はチップの消耗による除去能の低下を招くため、ダイヤモンドの刃こぼれ及びチップの先端部の短小化が確認できた際は直ちに使用を中止してください。
- MP2、MP3 チップは、SRP 使用後にダイヤモンド部分に感染物質が残留している可能性があるため、医療機器専用の洗浄液等を用いてこまめに超音波洗浄を行ってください。また、同チップを使用する際は必ず所見を通じて対象物を視覚的に確認した状態で使用してください。
- 不必要な切削やオーバートリートメントによる責任は負いかねます。
- ご使用に当たっては、事前にセミナーの受講等により適切な使用方法を習得いただきますようお願い申し上げます。

東京歯科産業株式会社

<本製品に関するお問い合わせ先>

東京歯科産業株式会社 営業部

TEL : 03-3831-0176 (代)

Mail : info@tokyodental.co.jp